

ENTRETIEN ET HYGIÈNE

COM_PRA_018_002

SMIA
PRÉVENTION & SANTÉ AU TRAVAIL

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL
PAYS DE LA LOIRE

- Ce qui peut altérer l'étanchéité du masque : taille non adaptée à la morphologie du visage, la barbe, les lunettes, un mauvais ajustement.
- Changer les filtres selon la fréquence de travail, la fréquence respiratoire, les niveaux d'expositions, le stockage, lorsque la résistance respiratoire devient excessive, lorsque l'alarme de colmatage se déclenche sur les ventilations assistées.
- Inspecter le masque avant toute utilisation, respecter les recommandations du fabricant, nettoyer les appareils réutilisables après chaque utilisation.
- Stockage : les Appareils de Protection Respiratoire doivent être stockés dans un sachet hermétique à l'abri de l'humidité, la chaleur, les rayonnements Ultra Violets... Les filtres sont à stocker dans un endroit propre, à l'abri de la lumière dans un boîte hermétique. Noter la date du début d'utilisation des filtres.

Plus d'informations sur
notre site Internet !



Nos conseillères EPI vous accompagnent !
N'hésitez pas à les contacter pour des conseils personnalisés.



02 41 47 92 92



<https://smia.sante-travail.net>



epi.smia@sante-travail.net



25 rue Carl Linné,
49000 Angers

EPI - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

POSER ET AJUSTER VOS PROTECTIONS RESPIRATOIRES

BIEN POSITIONNÉ, BIEN PROTÉGÉ !

Bien positionner vos protections respiratoires permet de vous protéger au quotidien des risques présents à votre poste. Le SMIA vous accompagne pour faire le bon choix d'Équipements de Protection Individuelle.

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

PRÉVENIR

POSITIONNEMENT ET AJUSTEMENT

1



Ouvrir le masque, mettre en forme la barre nasale.

2



Poser le masque sur le visage à partir du menton et passer les brides par dessus la tête. Bien ajuster au-dessus et en-dessous des oreilles sans les croiser.

3



4



5



Ajuster en tirant le bord inférieur sous le menton et en tenant le bord supérieur sur le nez.

6



A l'aide des 2 mains, ajuster la barrette nasale sur le nez avec les doigts.

7



Couvrir le masque avec les 2 mains. En cas de fuite autour du nez, rajuster la pince nasale (étape 6). En cas de fuite sur les côtés, régler la position des brides et veiller à ce que les bords du masque soient en contact étroit avec le visage.

RETRAIT À 1 OU 2 MAINS

1



Sans toucher au masque faire passer les brides inférieures et supérieures par-dessus la tête

2



3



Entreposer ou mettre au rebut suivant la politique de prévention des infections de son entreprise.

1



Placer le masque sur le nez et la bouche en laissant les sangles inférieures détachées. Placer la sangle supérieure par-dessus la tête, en plaçant le harnais sur le haut de la tête.

2



Placer les sangles sur la nuque puis les attacher.

3



Régler la tension des sangles en tirant sur les extrémités pour obtenir l'ajustement désiré.

VÉRIFICATIONS



Couvrir la soupape avec la main, exhaler doucement : le masque doit gonfler légèrement. Si l'on décèle une fuite d'air, replacer le masque sur le visage et/ou réajuster la tension des sangles.



Placer la paume des mains sur les cartouches, inhaler doucement : le masque doit s'affaisser légèrement. Si des fuites d'air surviennent le replacer et ajuster les sangles.



Placer les pouces sur la partie centrale des filtres, inhaler doucement : le masque doit s'affaisser légèrement.